



ITALIANO/ENGLISH

DIANA  
OC-SENSOR

OC-SENSOR *μ*

ISTRUZIONI DI PRELIEVO / COLLECTING INSTRUCTION

1

Svitare ed estrarre il tappo VERDE dal tubo  
*Unscrew and take out GREEN cap*




Scrivere sull'etichetta i dati richiesti  
*Fill in the label with requested information*

[N]: Nome/Name      [A]: Età/Age  
[S]: Sesso/Sex      [D]: Data/Date

2


Strisciare l'asticella sopra le feci  
più volte in orizzontale e verticale  
*Drag the stick on the stool several times, horizontally and vertically*

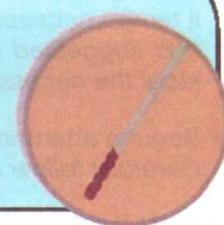

3

Inserire l'asticella nel tubo, riavvitare ed agitare  
*Tighten cap closely and shake vigorously*

Riconsegnare il prelievo in laboratorio  
il più rapidamente possibile. Nel caso  
in cui non venga riconsegnato subito lo  
conservi in frigorifero (2-10°C).

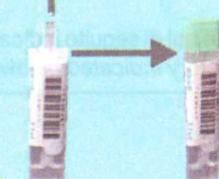

*In case the sample shouldn't reach the lab straight away, make sure that it is stored in a fridge (2-10° C).*

Prevenire è meglio che curare  
*Preventing is better than treating*